

Papacárie Duo protocole d'utilisation



1. Effectuer une radiographie diagnostique périapicale ou interproximale.
2. Nettoyer à l'eau la zone à traiter.
3. Isoler la zone avec un coton salivaire.
4. Mettre le gel dans un godet Dappen ou sur le gant ou encore utiliser un embout d'application.
5. Appliquer une goutte de gel sur le tissu carié et le laisser agir 30 à 60 secondes.
6. Racler le tissu ramolli (par le gel) avec un instrument non tranchant (curette ou excavateur).
7. Si nécessaire, renouveler cette opération une seconde fois jusqu'à l'élimination de tout le tissu carié.
8. Vérifier que la surface de la cavité soit dure et brillante.
9. Nettoyer la cavité à l'eau ou à l'Hypochlorite de sodium.
10. Procéder à la restauration selon le protocole habituel (CVI ou composite bioactif conseillé).
11. Effectuer une radiographie de contrôle.

